



Orla Etämittäus Diagnostisk Astma bruksanvisning

20.12.2021

Orla DTx Oy

Ekogatan 4b, 00530 Helsingfors

FO-nummer: 3112174-5

www.orladtx.com

Innehåll

1.	Dataskydd.....	3
2.	Om mätningen.....	4
3.	Sammansättning.....	5
4.	Förbereda telefon.....	6
4.1.	Android	6
4.2.	iOS.....	7
4.3.	Telefoninställningar	8
4.3.1.	Bluetooth	8
4.3.2.	Skärmlåsning.....	8
4.3.3.	Flygläge	8
4.3.4.	Strömsparläge.....	9
4.3.5.	Datum och klockslag.....	9
4.3.6.	Internetanslutning	9
5.	Utföra mätningen.....	10
6.	Kontaktuppgifter	13

1. Dataskydd

Vi behandlar din information endast i enlighet med våra avtal med vårdgivare och din vårdgivares instruktioner. Din information skyddas av lämpliga skyddsåtgärder och kommer att bevaras tills din vårdgivare ger oss instruktioner att radera den.

Eftersom vi endast behandlar patientuppgifter på uppdrag av vårdgivare, kan du inte direkt utöva dina dataskydds rättigheter genom oss. Istället bör du kontakta din vårdgivare, som sedan ger oss instruktioner om nödvändiga åtgärder.

För frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@orladtx.com. Mer information om dataskydd finns tillgänglig online på <https://orladtx.com/fi/tietosuoja/> (på finska).

2. Om mätningen

Du har fått ett Vitalograph Lung Monitor BT-mätinstrument (Bild 1). Enheten mäter lungornas funktionsförmåga och efter mätningen sänder din telefon mätvärdena automatiskt till en yrkesperson. Hantera enheten och telefonen varsamt.

Se till att telefonens batteri alltid är laddat och ha alltid telefonen påslagen. Se till att telefonens Bluetooth-anslutning är aktiverad.

Enheten och telefonen är inställda så att de fungerar automatiskt tillsammans och du ska följa telefonens anvisningar för att utföra mätningen.

Utför mätningarna morgon och kväll under 14 dygn vid en tidpunkt som du kommit överens om med vårdpersonalen. Telefonen påminner dig om mätningen med en ringsignal. Utför den första mätningen innan du tar medicinen och ta medicinen genast efter detta. Telefonen påminner dig om mätningen efter att du tagit medicinen 15 minuter efter den första mätningen.

Om du får ett astmaanfall, ska du utföra mätningen efter att anfallet börjat, sedan ta medicinen och utföra en ny mätning 15 minuter efter den första mätningen. Andra gången du mäter frågar telefonen dig om faktorer som du anser vara förknippade med anfallet (damm, kyla osv.). Du kan skriva ditt svar i det tomma textfältet.

Vid varje mätning görs minst tre blåsningar. Enheten övervakar kvaliteten på mätningarna och meddelar om blåsningen inte var tillräckligt bra eller om de uppmätta värdena avviker för mycket från varandra. I detta fall ber enheten dig göra 1–2 extra blåsningar. Det är viktigt att du koncentrerar dig på varje blåsning och utför dem noggrant i enlighet med anvisningarna.

Observera att enheten endast är avsedd för ditt personliga bruk. Alla mätningar som utförs med enheten skickas till sjukhusets fil. Använd enheten noggrant i enlighet med anvisningarna och se till att den är utom räckhåll för barn.



Bild 1

3. Sammansättning

För att fungera kräver Orla Etämittaus följande sammansättning:

- Telefon
- Etämittaus-applikationen
Du kan hämta en uppdaterad applikation i telefonens appbutik.
- Mätinstrument med tillbehör (inkl. egen anvisning)
- Bruksanvisningen för Etämittaus (detta dokument)

4. Förbereda telefon

4.1. Android

Observera att din telefon måste använda operativsystemversionen *Android 7.0* eller senare. Du kan kontrollera vilken version som används via *Inställningar / Allmänna / Om telefonen / Android-version*.

Ladda ned Orla Etämittaus-appen till telefonen:

1. Starta telefonen och lås upp den. Sök fram *Play Butik* på startskärmen (startskärmarna) och tryck på ikonen (Bild 2).
2. Skriv in *Orla Etämittaus* i sökfältet som öppnas upptill på skärmen. Tryck sedan på *förstoringsglaset*. (Bild 3).

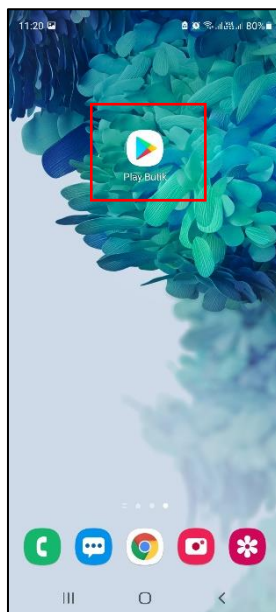


Bild 3

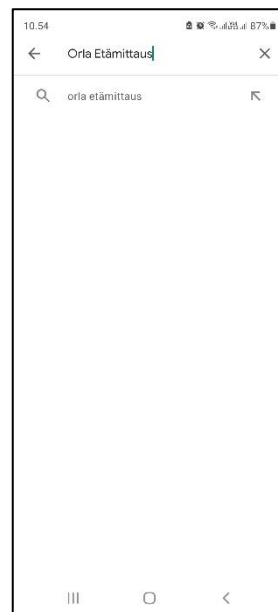


Bild 2

3. Välj Orla Etämittaus-applikationen genom att trycka på ikonen (Bild 4).
4. Starta installationen genom att trycka på *Installera* (Bild 5).

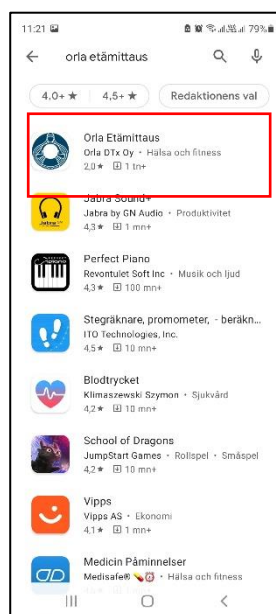


Bild 4

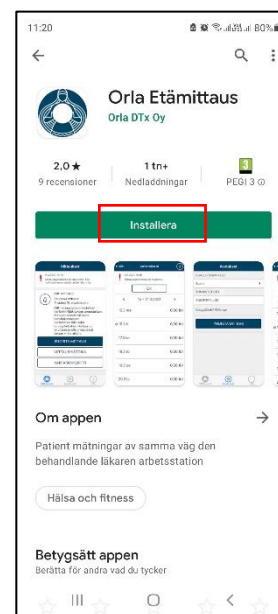


Bild 5

- Installationen är klar när texten Öppna visas (Bild 6) visas på skärmen. Observera att installationen kan ta lite tid beroende på internetanslutningens hastighet.
- Nu kan du öppna Orla Etämittaus-applikationen eller sluta genom att trycka på Hemschärmen.
- När du öppnar applikationen första gången, ber Orla Etämittaus om behörighet till behövliga funktioner. (Bild 7).

Observera att Orla Etämittaus inte använder dina bild- och mediefiler eller platser, men dessa kategorier ger också tillåtelse att överföra mätresultat mellan telefonen och mätaren.

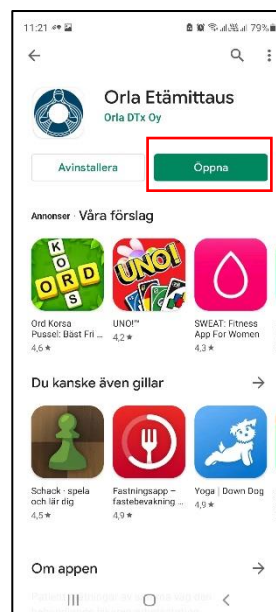


Bild 6

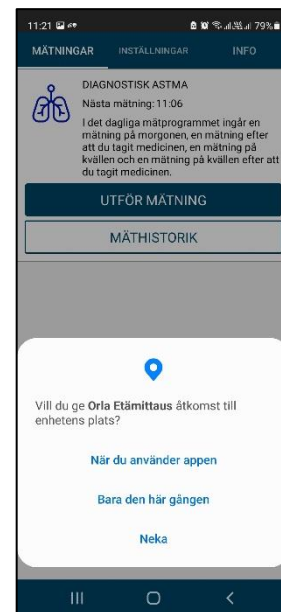


Bild 7

4.2. iOS

Observera att din telefon måste använda operativsystemversionen *iOS 9.0* eller senare. Du kan kontrollera vilken version som används via *Inställningar / Allmänt / Om / Version*.

Ladda ned Orla Etämittaus-applikationen till telefonen:

- Starta telefonen och lås upp den. Sök fram *App Store* på startskärmen och tryck på ikonen (Bild 8)
- Tryck på bilden av *förstoringsglaset* (Bild 9) och skriv in *Orla Etämittaus* i textfältet som öppnas upptill på skärmen. Tryck sedan på *Sök*.



Bild 8

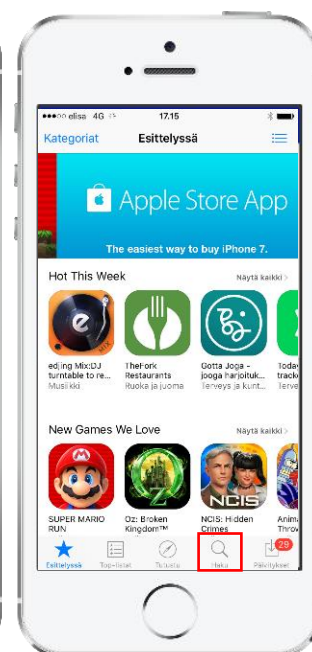


Bild 9

3. Hämta Orla Etämittaus-applikationen genom att trycka på nedladdningsikonen (Bild 10). Applikationen installeras automatiskt. Observera att installationen kan ta en stund beroende på internetanslutningens hastighet.
4. Installationen är klar när texten *Öppna* visas på skärmen (Bild 11). Nu kan du öppna Orla Etämittaus-applikationen eller sluta genom att trycka på *Hemskärm*-knappen.

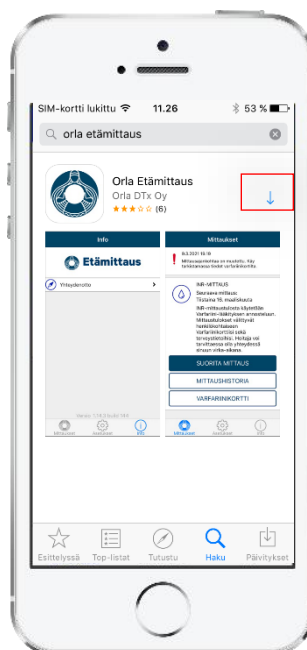


Bild 10

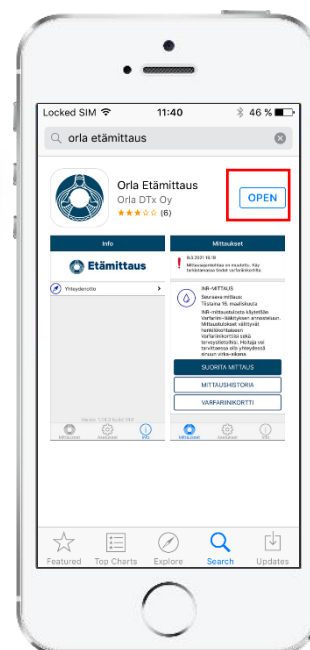


Bild 11

5. När du öppnar applikationen första gången, ska du tillåta att den skickar aviseringar genom att trycka på *Tillåt* (Bild 12). Om du inte tillåter aviseringar, får du bl.a. inga påminnelser om att utföra mätningen.



Bild 12

4.3. Telefoninställningar

För att fungera tillförlitligt kräver Orla Etämittaus-applikationen att vissa inställningar i telefonens operativsystem har ställts in i enlighet med anvisningarna i detta dokument. Orla DTx kan inte garantera att applikationen fungerar korrekt, om telefoninställningarna inte motsvarar anvisningarna i detta dokument.

4.3.1. Bluetooth

Telefonens Bluetooth-anslutning ska vara aktiverad. Utan Bluetooth-anslutning fungerar inte dataöverföringen mellan telefonen och mätinstrumentet.

4.3.2. Skärmlåsning

Tidsgränsen för telefonens skärmlåsning ska ställas in så att tiden är så lång som möjligt. Den minsta kompatibla tidsgränsen är 5 minuter.

Det rekommenderas att telefonens skärm läses med ett lösenord, en skyddskod eller ett skyddsmönster. På så sätt skyddas din telefon och Orla Etämittaus-applikationen mot obehörig användning.

4.3.3. Flygläge

Flygläge får inte vara aktiverat.

4.3.4. Strömssparläge

Strömssparläge ska avaktiveras. När strömssparläget är aktiverat kan applikationstexterna vara svåra att läsa eftersom skärmen är mörk. Strömssparläget kan också medföra att telefonen inte ger påminnelser om att utföra mätningen.

4.3.5. Datum och klockslag

Med tanke på uppföljning och rapportering av mätresultaten är det viktigt att datum och klockslag är korrekt inställda på telefonen.

4.3.6. Internetanslutning

Med tanke på överföringen av mätresultaten är det viktigt att telefonen har en dataanslutning. Mätningarna kan också utföras utan dataanslutning. Då överförs mätresultaten till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården nästa gång dataanslutningen är tillgänglig.

5. Utföra mätningen

Mätningarna utförs enligt anvisningen nedan:

- På morgonen
- På kvällen
- Vid astmaanfall

Telefonen meddelar morgon och kväll om de mätningar som ingår i dagens program. När telefonen meddelar kan du börja utföra mätningen genom att trycka på aviseringen på telefonen eller genom att följa punkt 1 nedan.

1. Starta Distansmätningen genom att trycka på app-ikonen på telefonens skärm.
2. När mätprogrammet har uppdaterats i telefonen, visas vyn Mätningar (Bild 13), där mätprogrammet för diagnostisk astma syns. Starta mätningen genom att trycka på *Utför mätning*.



Bild 13

3. Välj om mätningen hör till de dagliga mätningarna (Enligt program) eller till Astmaanfall eller mätning av annan orsak. (Bild 14). Om mätningen gäller astmaanfall eller extra mätning av annan orsak, så kommer applikationen att be om information om mätningen görs *Utan medicinering* eller *Efter medicinering*.
4. Godkänn valet genom att trycka *Fortsätt*.



Bild 14

5. Applikationen uppmanar dig att slå på mätenheten (Bild 15). Om mätinstrumentet inte har sammankopplats med telefonen efter en minut (söker fortsättningsvis en Bluetooth-enhet), tryck Avbryt och försök igen.

Se till att munstycket som du fått av skötaren är installerat i mätenheten (Bild 16). Slå på enheten genom att trycka på startknappen uppe till höger i 2–3 sekunder. Ett signalljud hörs från enheten och en symbol för blåsning visas på skärmen.



Bild 16

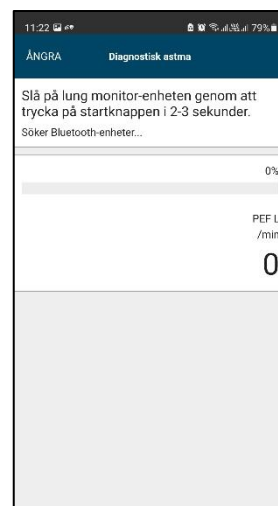


Bild 15

6. Applikationen ber dig utföra den första blåsningen (Bild 17).

Följ dessa anvisningar:

- Greppa enheten stadigt, men så lågt nere att fingrarna inte täcker hålet där luften kommer ut (Bild 18).



Bild 18

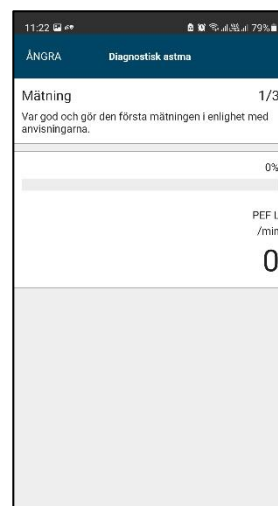


Bild 17

- Stå rak i ryggen, andas så djupt som möjligt och håll samtidigt enheten framför munnen. Placera munstycket lätt mellan tänderna och slut läpparna tätt runt munstycket. *Gör en kort, skarp blåsning med maximal kraft i mätaren* (Bild 19).



Bild 19

7. Följ sedan telefonens anvisningar. När telefonen ber om nästa blåsning ska du räkna till fem innan du blåser.

8. När mätserien är klar, meddelar telefonen dig detta (Bild 20). Genom att trycka på Fortsätt ser du ett sammandrag över dina mätresultat. Du kan även se detta under *Mät historik*.
9. Stäng programmet genom att trycka på *Hem*-knappen nertill på telefonen. Applikationen meddelar dig igen när det är dags för nästa mätning.
10. Mätenheten stängs av automatiskt.

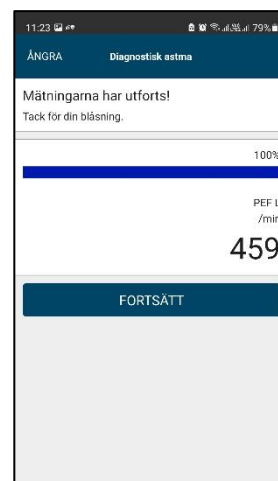


Bild 20

6. Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring hälsotillstånd, läkemedelsdoseringen eller något motsvarande, kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Fatta inga beslut relaterade till behandlingen utan att först diskutera det med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Skötarens uppgifter:

Namn: _____

Telefon: _____

E-postadress: _____

Om problemet gäller Etämittaust-applikationen, kontakta:

Teknisk användarsupport för patienter

Telefon: +358 50 435 2071

E-postadress: potilastuki@orladtx.com

Vid problem med mätinstrumentet, se närmare anvisningar i mätinstrumentets bruksanvisning.

Tillverkaren och den behöriga myndigheten ska informeras om eventuella allvarliga farliga situationer.