



# Orla Etämittäus

# Yrkesastma bruksanvisning

25.4.2024

## **Orla DTx Oy**

Ekogatan 4b, 00530 Helsingfors

FO-nummer: 3112174-5

[www.orladtx.com](http://www.orladtx.com)

## Innehåll

1. Dataskydd .....	3
2. Om mätningen .....	4
3. Sammansättning .....	5
4. Förbereda telefon .....	6
4.1. Android .....	6
4.2. iOS .....	7
4.3. Telefoninställningar .....	8
4.3.1. Bluetooth .....	8
4.3.2. Skärmlåsning .....	8
4.3.3. Flygläge .....	8
4.3.4. Strömsparläge .....	9
4.3.5. Datum och klockslag .....	9
4.3.6. Internetanslutning .....	9
5. Utföra mätningen .....	10
6. Kontaktuppgifter .....	13

# 1. Dataskydd

Vi behandlar din information endast i enlighet med våra avtal med vårdgivare och din vårdgivares instruktioner. Din information skyddas av lämpliga skyddsåtgärder och kommer att bevaras tills din vårdgivare ger oss instruktioner att radera den.

Eftersom vi endast behandlar patientuppgifter på uppdrag av vårdgivare, kan du inte direkt utöva dina dataskyddsrättigheter genom oss. Istället bör du kontakta din vårdgivare, som sedan ger oss instruktioner om nödvändiga åtgärder.

För frågor om dataskydd, vänligen kontakta oss via e-post på [privacy@orladx.com](mailto:privacy@orladx.com). Mer information om dataskydd finns tillgänglig online på <https://orladx.com/fi/tietosuoja/> (på finska).

## 2. Om mätningen

Du har fått ett Vitalograph Lung Monitor BT (Bild 1a) eller Medikro Duo (Bild 1b) -mätinstrument. Enheten mäter lungornas funktionsförmåga och efter mätningen sänder din telefon mätvärdena automatiskt till en yrkesperson. Hantera enheten och telefonen varsamt.

Se till att telefonens batteri alltid är laddat och ha alltid telefonen påslagen. Se till att telefonens Bluetooth-anslutning är aktiverad.

Enheten och telefonen är inställda så att de fungerar automatiskt tillsammans och du ska följa telefonens anvisningar för att utföra mätningen.

Utför mätningarna dagligen från morgon till kväll med två timmars mellanrum. Utför den första mätningen genast efter att du vaknat. Därefter påminner telefonen dig om följande mätning efter två timmar.

Vid varje mätning görs minst tre blåsningar. Enheten övervakar mätkvaliteten och meddelar om blåsningen inte var tillräckligt bra eller om de uppmätta värdena avviker för mycket från varandra. I detta fall ber enheten dig göra 1–2 extra blåsningar. Det är viktigt att du koncentrerar dig på varje blåsning och utför dem noggrant i enlighet med anvisningarna.

I början av mätningen ställer applikationen frågor om bl.a. anledningen till mätningen (enligt program eller astmaanfall), om det är arbetsdag eller ledig dag, var du befinner dig och de rådande förhållandena.

Till slut frågar applikationen om mätningen var den sista för dagen. Om du svarar "Nej", påminner telefonen dig efter två timmar om en ny mätning. Om du strax ska lägga dig, svarar du "Ja" på denna fråga. Då påminner telefonen inte längre om en ny mätning. Kom ihåg att utföra mätningen genast efter att du vaknat. Därefter påminner telefonen dig om ny mätning med två timmars mellanrum.

Om du får ett astmaanfall, ska du utföra mätningen efter att anfallet börjat, sedan ta medicinen och utföra en ny mätning 15 minuter efter den första mätningen. Andra gången du mäter frågar telefonen dig om faktorer som du anser vara förknippade med anfallet (damm, kyla osv.). Du kan skriva ditt svar på det tomma textfältet.

Om mätningen avbryts, tryck på "Ångra" uppe till vänster på skärmen och starta om mätningen.

Observera att enheten endast är avsedd för ditt personliga bruk. Alla mätningar som utförs med enheten registreras automatiskt som dina mätningar. Använd enheten noggrant i enlighet med anvisningarna och se till att den är utom räckhåll för barn.



Bild 1a



Bild 1b

### 3. Sammansättning

För att fungera kräver Orla Etämittausta följande sammansättning:

- Telefon
- Etämittausta-applikationen  
Du kan hämta en uppdaterad applikation i telefonens appbutik.
- Mätinstrument med tillbehör (inkl. egen anvisning)
- Bruksanvisningen för Etämittausta (detta dokument)

## 4. Förbereda telefon

### 4.1. Android

Observera att din telefon måste använda operativsystemversionen *Android 7.0* eller senare. Du kan kontrollera vilken version som används via *Inställningar / Allmänna / Om telefonen / Android-version*.

Ladda ned Orla Etämittäus-appen till telefonen:

1. Starta telefonen och lås upp den. Sök fram *Play Butik* på startskärmen (startskärmarna) och tryck på ikonen (Bild 2).
2. Skriv in *Orla Etämittäus* i sökfältet som öppnas upptill på skärmen. Tryck sedan på *förstoringsglaset*. (Bild 3).

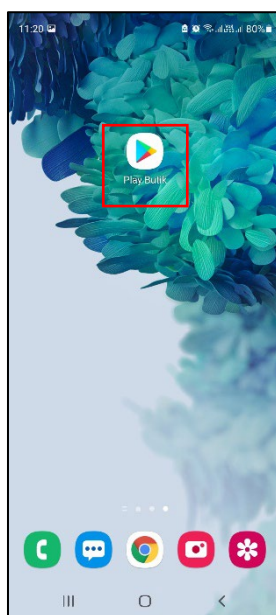


Bild 2



Bild 3

3. Välj Orla Etämittäus-applikationen genom att trycka på ikonen (Bild 4).
4. Starta installationen genom att trycka på *Installera* (Bild 5).

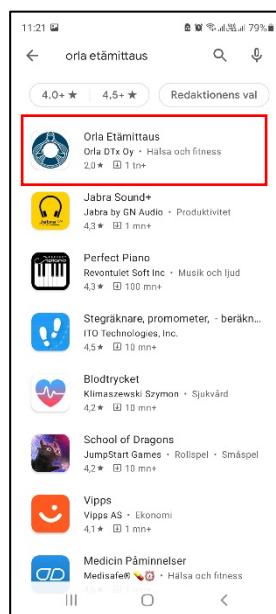


Bild 4

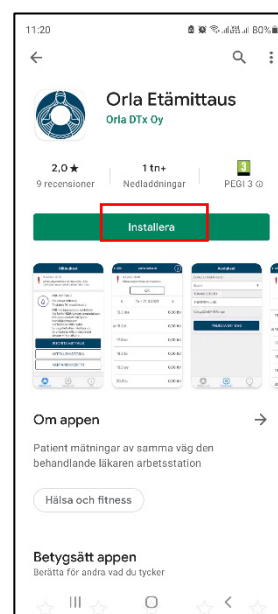


Bild 5

5. Installationen är klar när texten Öppna (Bild 6) visas på skärmen. Observera att installationen kan ta lite tid beroende på internetanslutningens hastighet.
6. Nu kan du öppna Orla Etämittaus-applikationen eller sluta genom att trycka på Hemskrämen.
7. När du öppnar applikationen första gången ber Orla Etämittaus om behörighet till behövliga funktioner. (Bild 7).

Observera att Orla Etämittaus inte använder dina bild- och mediefiler eller platser, men dessa kategorier ger också tillåtelse att överföra mätresultat mellan telefonen och mätaren.

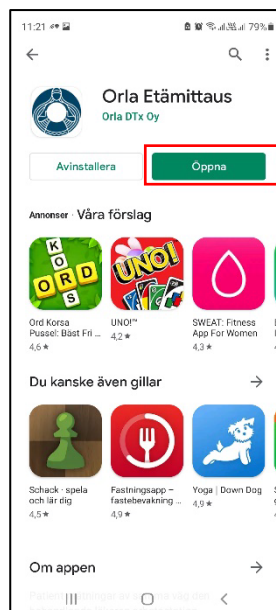


Bild 6

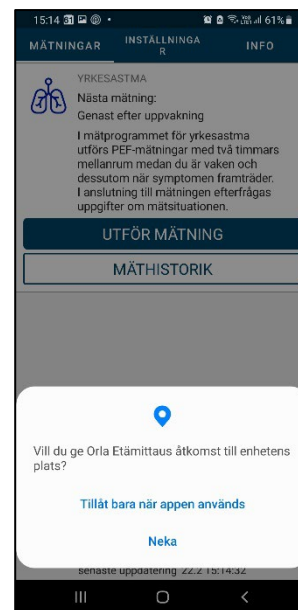


Bild 7

#### 4.2. iOS

Observera att din telefon måste använda operativsystemversionen *iOS 9.0* eller senare. Du kan kontrollera vilken version som används via *Inställningar / Allmänt / Om / Version*.

Ladda ned Orla Etämittaus-applikationen till telefonen:

1. Starta telefonen och lås upp den. Sök fram *App Store* på startskärmen och tryck på ikonen (Bild 8)
2. Tryck på bilden av *förstoringsglaset* (Bild 9) och skriv in *Orla Etämittaus* i textfältet som öppnas upptill på skärmen. Tryck sedan på *Sök*.



Bild 8

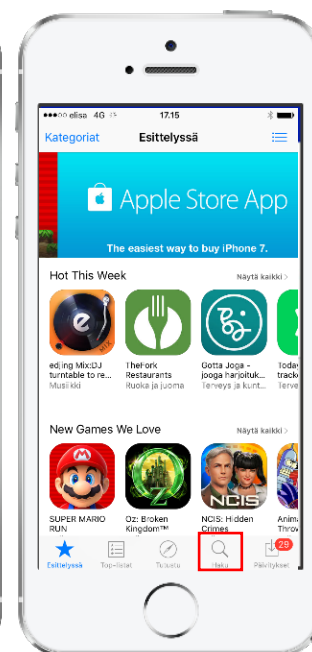


Bild 9

3. Hämta Orla Etämittaus-applikationen genom att trycka på nedladdningsikonen (Bild 10). Applikationen installeras automatiskt. Observera att installationen kan ta en stund beroende på internetanslutningens hastighet.
4. Installationen är klar när texten *Öppna* visas på skärmen (Bild 11). Nu kan du öppna Orla Etämittaus-applikationen eller sluta genom att trycka på *Hemskärm*-knappen.

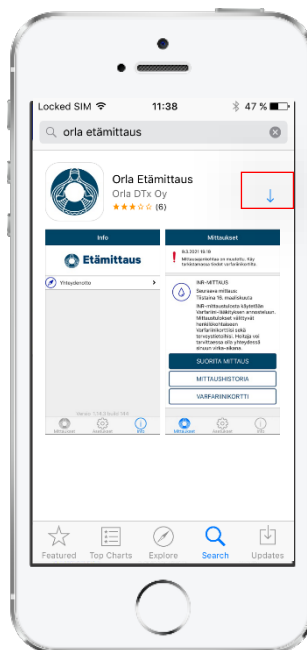


Bild 10

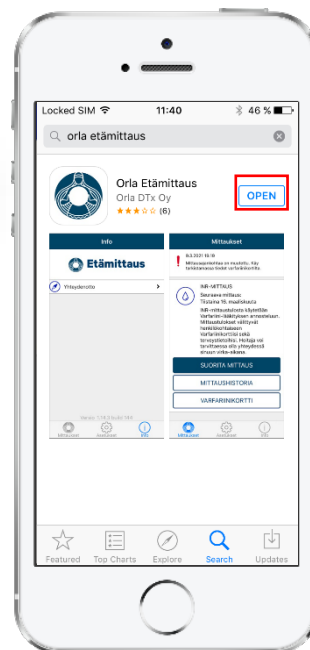


Bild 11

5. När du öppnar applikationen första gången, ska du tillåta att den skickar aviseringar genom att trycka på *Tillåt* (Bild 12). Om du inte tillåter aviseringar, får du bl.a. inga påminnelser om att utföra mätningen.

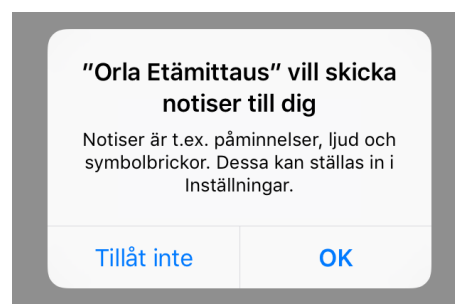


Bild 12

### 4.3. Telefoninställningar

För att fungera tillförlitligt kräver Orla Etämittaus-applikationen att vissa inställningar i telefonens operativsystem har ställts in i enlighet med anvisningarna i detta dokument. Orla DTx kan inte garantera att applikationen fungerar korrekt, om telefoninställningarna inte motsvarar anvisningarna i detta dokument.

#### 4.3.1. Bluetooth

Telefonens Bluetooth-anslutning ska vara aktiverad. Utan Bluetooth-anslutning fungerar inte dataöverföringen mellan telefonen och mätinstrumentet.

#### 4.3.2. Skärmlåsning

Tidsgränsen för telefonens skärmlåsning ska ställas in så att tiden är så lång som möjligt. Den minsta kompatibla tidsgränsen är 5 minuter.

Det rekommenderas att telefonens skärm låses med ett lösenord, en skyddskod eller ett skyddsmönster. På så sätt skyddas din telefon och Orla Etämittaus-applikationen mot obehörig användning.

#### 4.3.3. Flygläge

Flygläge får inte vara aktiverat.



#### 4.3.4. Strömsparläge

Strömsparläge ska avaktiveras. När strömsparläget är aktiverat kan applikationstexterna vara svåra att läsa eftersom skärmen är mörk. Strömsparläget kan också medföra att telefonen inte ger påminnelser om att utföra mätningen.

#### 4.3.5. Datum och klockslag

Med tanke på uppföljning och rapportering av mätresultaten är det viktigt att datum och klockslag är korrekt inställda på telefonen.

#### 4.3.6. Internetanslutning

Med tanke på överföringen av mätresultaten är det viktigt att telefonen har en dataanslutning. Mätningarna kan också utföras utan dataanslutning. Då överförs mätresultaten till en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården nästa gång dataanslutningen är tillgänglig.

## 5. Utföra mätningen

Utför den första mätningen genast efter att du vaknat. Därefter påminner telefonen dig om mätning med två timmars mellanrum tills du svarar att det är den sista mätningen för dagen innan du lägger dig.

När telefonen meddelar kan du börja utföra mätningen genom att trycka på aviseringen på telefonen eller genom att följa punkt 1 nedan.

1. Starta Orla Etämittäus-applikationen genom att trycka på appikonerna på telefonens skärm.
2. När mätprogrammet har uppdaterats i telefonen, visas vyn Mätningar (Bild 13), där mätprogrammet för diagnostisk astma syns. Starta mätningen genom att trycka på *Utför mätning*.

Du kan uppdatera mätprogrammet på telefonen genom att trycka på *Uppdatera information* (om vårdpersonalen ber dig att göra det).

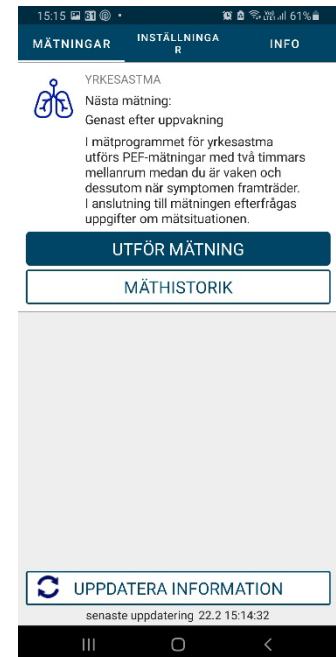


Bild 13

3. Välj om mätningen hör till de dagliga mätningarna (Enligt program) eller till Astmaanfall eller mätning av annan orsak. (Bild 14). Om mätningen gäller astmaanfall eller extra mätning av annan orsak, så kommer applikationen att be om information om mätningen görs *Utan medicinering* eller *Efter medicinering*.
4. Godkänn valet genom att trycka *Fortsätt*.

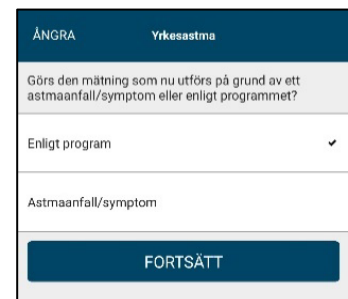


Bild 14

5. Svara på frågorna om mätningen. Du kan själv lägga till arbetsuppgift, arbetsplats och/eller exponeringsfaktor, om du inte hittar ett lämpligt alternativ i listan (Bild 15). Godkänn alltid valet genom att trycka på *Fortsätt*.

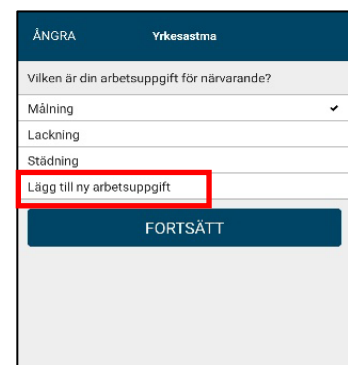




Bild 15

6. Applikationen uppmanar dig att slå på mätenheten (Bild 16). Om mätnstrumentet inte har sammankopplats med telefonen efter en minut (söker fortsättningsvis en Bluetooth-enhet), tryck Avbryt och försök igen.

<b>Vitalograph Lung Monitor</b>	<b>Medikro Duo</b>
<p>Se till att munstycket som du fått av skötaren är installerat i mätenheten (Bild 17a). Slå på enheten genom att trycka på startknappen uppe till höger i 2–3 sekunder. Ett signalljud hörs från enheten och en symbol för blåsning visas på skärmen.</p>	<p>Se till att munstycket som du fått av skötaren är installerat i mätenheten (Bild 17b). Slå på enheten genom att trycka på startknappen under skärmen (Bild 17b). Ett signalljud hörs från enheten och texten "PEF" och en graf för blåsning visas på skärmen.</p>
 <p style="text-align: center;">Kuva 17a</p>	 <p style="text-align: center;">Kuva 17b</p>

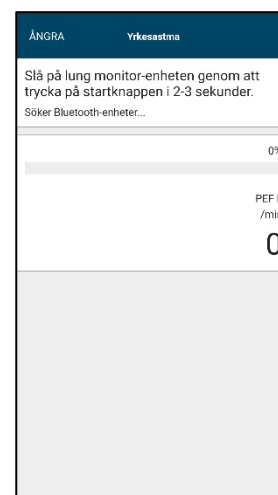


Bild 16

7. Applikationen ber dig utföra den första blåsningen (Bild 18).

Följ dessa anvisningar:

- Greppa enheten stadigt, men så lågt nere att fingrarna inte täcker hålet där luften kommer ut (Bild 19).



Bild 19

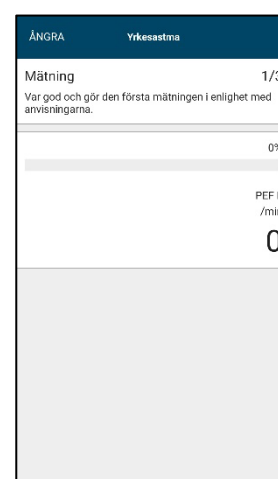


Bild 18

- Stå rak i ryggen, andas så djupt som möjligt och håll samtidigt enheten framför munnen. Placera munstycket lätt mellan tänderna och slut läpparna tätt runt munstycket. *Gör en kort, skarp blåsning med maximal kraft i mätaren (Bild 20).*



Bild 20

8. Följ sedan telefonens anvisningar. När telefonen ber om nästa blåsning ska du räkna till fem innan du blåser.
9. När mätserien är klar, meddelar telefonen dig detta (Bild 21). Genom att trycka på Fortsätt ser du ett sammandrag över dina mätresultat. Du kan även se detta under *Mäthistorik*.
10. Stäng programmet genom att trycka på *Hem*-knappen nertill på telefonen. Applikationen meddelar dig igen när det är dags för nästa mätning.
11. Mätenheten stängs av automatiskt.

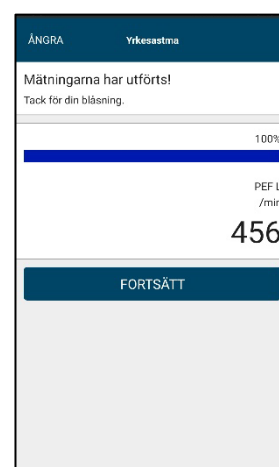


Bild 21

## 6. Kontaktuppgifter

Om du har frågor kring hälsotillstånd, läkemedelsdoseringen eller något motsvarande, kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Fatta inga beslut relaterade till behandlingen utan att först diskutera det med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Skötarens uppgifter:

Namn: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_

Om problemet gäller Etämittäus-applikationen, kontakta:

Teknisk användarsupport för patienter

Telefon: +358 50 435 2071

E-postadress: [potilastuki@orladtx.com](mailto:potilastuki@orladtx.com)

Vid problem med mätinstrumentet, se närmare anvisningar i mätinstrumentets bruksanvisning.

Tillverkaren och den behöriga myndigheten ska informeras om eventuella allvarliga farliga situationer.